

Pflege von Kunststoffbrillengläsern

Bitte beachten Sie diese Pflegehinweise:

Reinigung unter kaltem oder lauwarmen Wasser mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel.

Für die Reinigung zwischendurch ein weiches, sauberes Microfasertuch verwenden. Das Tuch ohne Zugabe von Weichspüler regelmäßig bei 40°C waschen.

Keine scharfen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden.

Die Brille bei Nichtgebrauch immer im festen, sauberen Etui aufbewahren und nicht auf die Vorderseite der Brillengläser legen.

Kunststoffbrillengläser sind leicht, dünn und robust. Veredelte Kunststoffgläser sind besonders komfortabel und unempfindlich gegenüber Temperaturen bis 60° C.

Diese Temperatur wird beispielsweise überschritten bei Ablage der Brille auf dem Armaturenbrett des Autos in der Sonne, in der Sauna oder allgemein beim Kontakt mit heißen Dämpfen oder Flüssigkeiten.

Die Beschichtung der Brillengläser wird dabei sehr schnell und dauerhaft zerstört. Auch die Tönung der Brillengläser wird dabei geschädigt.

Vermeiden Sie deshalb in jedem Fall diese Belastungen, um lange Freude an Ihren Kunststoffbrillengläser zu haben!

